

DEEP CLEAN est un appareil qui permet une exfoliation cutanée importante. Il peut être utilisé dans tout centre esthétique et centre médical esthétique de qualité, qui est attentif aux nouveautés et à la recherche scientifique.

#### ■ Cristaux de corindon

L'exfoliation cutanée contrôlée qui est effectuée par DEEP CLEAN permet une opération minutieuse sur tout type de peau, avec un soin spécial pour les peaux sensibles, fines et avec couperose.

Le traitement est pratiqué à travers un stylo avec capuchon mono-utilisation perforé qui permet l'émission et l'aspiration des microcristaux de corindon (minéral réduit en particules très petites).

L'opérateur passe rapidement mais d'une façon précise la tête sur le tissu du visage et/ou du corps à traiter (avec un mouvement comme si on traçait des lignes avec un stylo).

Pendant le passage de la tête, la poudre de corindon, est transmise à travers le trou sur le tissu qui, une fois frappé, est exfolié. Les cristaux et la peau abrasée sont aspirés à travers le même trou et sont envoyés dans le réservoir de déchargement placé dans la partie postérieure de l'appareil. A chaque passage de la tête, l'opérateur enlève une micro couche de surface cutanée dont l'épaisseur est proportionnée à la pression appliquée, à la quantité de microcristaux employés et inversement proportionnée à la vitesse de déplacement de la tête sur la partie traitée. L'hygiène est garantie, avant et après chaque séance, par le remplacement du capuchon et par l'emploi de cristaux de corindon propres (AL2O3) chargés dans le réservoir sur le derrière. A travers cette exfoliation remarquable, les cellules de la couche cornée de la peau sont éliminées et la couche sous-jacente apparaît avec sa fraîcheur et luminosité. Par conséquent, la peau gagne en élasticité et tonus.

#### ■ Dotación et technologie d'avant-garde

Capuches mono-utilisation pour une hygiène absolue et la tranquillité de l'opérateur et du patient.

Ecran LCD rétro-éclairé avec 240x180 pixels et un minuteur de traitement programmable jusqu'à 99 minutes.

Possibilité de choisir et utiliser 10 différents programmes pendant le traitement et personnaliser le programme en réglant l'abrasion en relation au tissu traité et à la surface désirée. Le design italien, exprès minimal, la facilité de transport et le choix de couleurs importantes mais élégantes caractérisent DEEP CLEAN, qui devient un instrument facile à utiliser, qui s'adapte à chaque contexte esthétique ou médical-esthétique.

Es un aparato que permite una exfoliación cutánea importante. Puede ser adoptada por todos los centros estéticos y centros médico-estéticos cualificados, alertas a las novedades y sobretodo a la investigación científica.

#### ■ Cristales de corindón

La exfoliación córnea controlada efectuada con DEEP CLEAN permite un trabajo minucioso en cada tipo de piel con particular atención a la piel sutil, y/o con couperosis.

El tratamiento se realiza mediante un lápiz provisto de capuchón monouso agujereado que permite la erogación y la aspiración de los micro-cristales de corindón (mineral reducido en pequesísimas partículas). El operador pasa de manera rápida pero precisa, el cabezal (como si trazara líneas con un lápiz), sobre el tejido del rostro y/o del cuerpo a tratar.

Durante el paso del cabezal, el polvo de corindón, se eroga mediante el agujero en el tejido que golpeado, se exfolia. Los cristales junto con la piel abrasada, se aspiran por el mismo agujero y vehiculados en el depósito de descarga situado en la parte trasera del aparato. En cada paso del cabezal, el operador elimina un microestrato de superficie cutánea cuyo espesor será proporcionado a la presión empleada, a la cantidad de microcristales que salen, e inversamente proporcional a la velocidad con la que se desplaza el cabezal y a la parte tratada. La máxima higiene antes y después de cada sesión se garantiza ya se por la sustitución del capuchón, como por el uso de cristales de corindón limpios (AL2O3) cargados en el depósito situado en la parte trasera.

A través de tal e importante exfoliación, se eliminan las células del estrato córneo y se descubre el estrato inferior nuevo, fresco, más luminoso. Se consigue mayor elasticidad y tonificación.

#### ■ Dotación y tecnología de vanguardia

Dotación y capuchones monouso para la absoluta higiene y tranquilidad de quien opera y de quien se somete al tratamiento. Display lcd retroiluminado de 240x180 pixels y un cronómetro de tratamiento programable hasta 99 minutos. La posibilidad de elegir y erogar 10 diferentes potencias durante el tratamiento, y de personalizar paso a paso el programa en uso regulando la abrasión en base al tejido tratado y a la zona sometida al tratamiento. El diseño italiano, minimalista, la facilidad de transporte y la elección de los colores importantes pero elegantes, hacen de DEEP CLEAN, un instrumento de fácil uso, que combina en cualquier contexto estético o médico-estético.

#### ■ Caractéristiques techniques

- Alimentation 230 Vac, 50-60 Hz, ±10%
- (115 Vac, 50-60 Hz, ±10% sur demande)
- Ecran LCD rétro-éclairé, alphanumérique 240 X 128
- Temps de traitement programmable jusqu'à 99 minutes
- Canaux sortie 1
- Programmes 5
- Dimensions 41x36x92H cm
- Poids appareil 32 Kg

#### ■ Características técnicas

- Alimentación de red 230Vac, 50-60 Hz, ±10%
- (115 Vac, 50-60 Hz, ±10% bajo pedido)
- Display LCD retro-iluminado, alfanumérico 240 x 128
- Tiempo de tratamiento programable hasta 99 minutos
- Canales de salida 1
- Número programas 5
- Tamaño 41x36x92H cm
- Peso cuerpo máquina 32 kg



noles

DEEP CLEAN - MAC 1310E



Derrière appareil / parte posterior del equipo

## DEEP CLEAN

DEEP CLEAN est un appareil qui permet une exfoliation cutanée importante et qui peut être utilisé dans tout centre esthétique et centre médical esthétique qualifié, qui est attentif aux nouveautés et à la recherche scientifique.

DEEP CLEAN est un appareil qui permet une exfoliation cutanée importante. Puede ser adoptada por todos los centros estéticos y centros médico-estéticos cualificados, atentos a las novedades y sobretodo a la investigación científica.

### ■ Bénéfices immédiats pour vos clients

DEEP CLEAN a été réalisé pour traiter efficacement: Vergetures, peau marquée par l'acné ou la varicelle, cicatrices hypertrophiques, pigmentation cutanée, taches que les taches de vieillesse présentes même sur les mains, rides et un excellent peeling sur le visage et corps de femmes et hommes.

### ■ Beneficios inmediatos para el cliente

DEEP CLEAN ha sido realizado para tratar con éxito: Cicatrices hipertróficas, secuelas de acné y varicela, estrías, pigmentaciones cutáneas como por ejemplo las llamadas manchas seniles presentes también en manos y arrugas a parte de un excelente peeling en rostro y cuerpo de hombre y mujeres.

### ■ Les bénéfices de la méthode

- Facilité d'emploi pour l'opérateur.
- Action complètement naturelle sans emploi de substances chimiques.
- Traitement non agressif pour le patient: il pourra amener une vie relationnelle normale après le traitement.
- Indolore ou presque, qui ne demande aucune anesthésie.
- Répétable, normalement avec un intervalle hebdomadaire.
- Permet une fidélisation du client.
- Fortement rémunérateur.
- Une fois terminé le cycle de séances totales, tout traitement effectué successivement donne un double résultat.

### ■ Los ventajas del método:


- Facilidad de uso por parte del operador.
- Es natural, no necesita el empleo de sustancias químicas.
- No es invalidante para quien se somete, consiste una normal vida de relación desde el día siguiente del tratamiento.
- Es indoloro o casi, no necesita anestesia.
- Es repetible, normalmente con intervalos semanales.
- Consiente una fidelización del cliente.
- Es altamente remunerativo.
- Al terminar el ciclo de sesiones totales, favorece el doble resultado en tratamientos aplicados sucesivamente.

### ■ Accessoires en dotation

- n. 1 Tête visage/corps - ACC1313/E
- n. 10 Capuches - ACC1313/I/E
- n. 1 Boite de Corindon 2 KG - ACC13102/E
- n. 1 Manuel d'emploi

### ■ Accesorios en dotación

- n. 1 Cabezal rostro/cuerpo ACC
- n. 10 Capuchones-ACC
- n. 1 Bote de Corindón de 2KG - ACC
- n. 1 Manual de uso

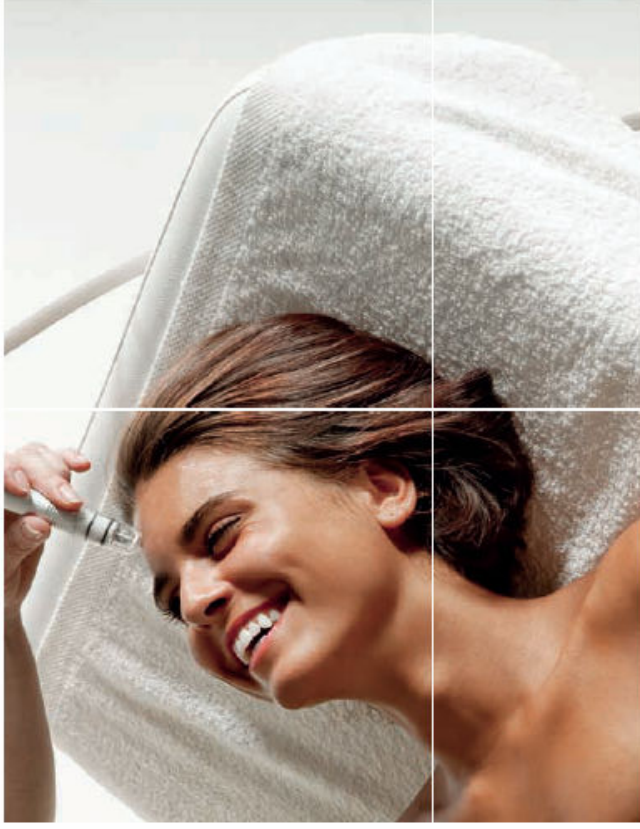

### ■ Accessoires optionnels

Les accessoires et les pièces de rechange sont disponibles.

### ■ Accesorios opcionales

Están disponibles los accesorios y los recambios del aparato.